


Kompetenz schafft Vertrauen

# Anwenderstunden

## Fisher und Paykel

### HC Serie

1. Schalten Sie das Gerät mit dem „Ein/Aus“-Schalter (Taste 1) an.

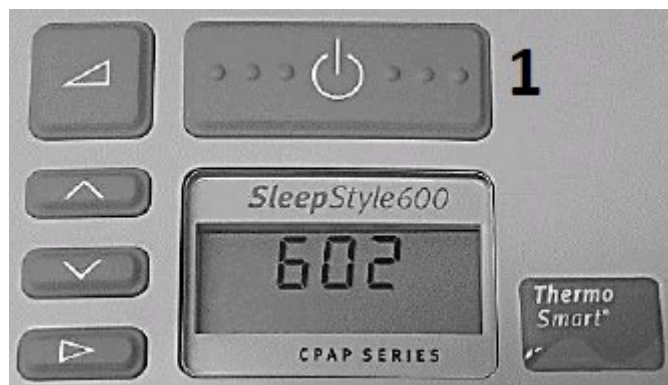

2. Drücken Sie auf die Taste 2 und Ihre Therapiestunden erscheinen im Display.



3. Lesen Sie den Wert von Ihrem Gerät ab und tragen Sie diesen in das von uns Ihnen zugesandte Formular ein.



Sanitätsfachhandel



Orthopädietechnik



Rehatechnik



Medizintechnik



Kinderreha nach Maß



Home Care