


Kompetenz schafft Vertrauen

Anwenderstunden Fisher und Paykel Icon

1. Drehen Sie an dem äußeren Ring (siehe Abbildung 1, Pfeil) des Druckknopfes um ins Menu zu gelangen.




2. Drehen Sie das Rad im Menu auf den achten Punkt (siehe Pfeil).

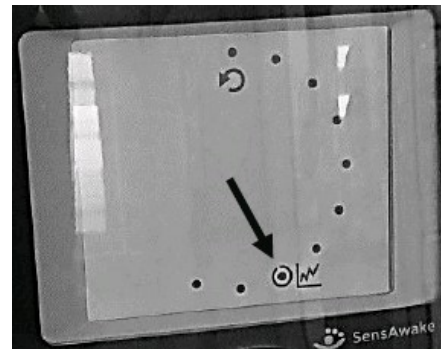

3. Durch Drücken des Knopfes gelangen Sie in das Untermenü des achten Punktes, in dem Sie Ihre Therapiestunden finden.

4. Hinter dem ersten Punkt im Untermenü (siehe Abbildung 3, Pfeil) können Sie nun Ihre Nutzungsstunden ablesen.

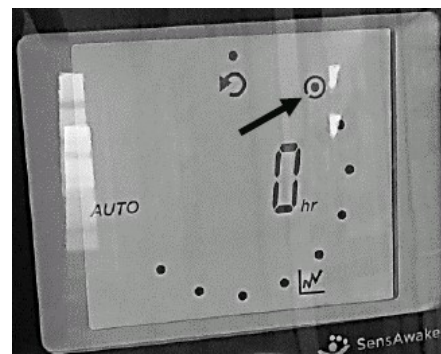

5. Lesen Sie den Wert von Ihrem Gerät ab und tragen Sie diesen in das von uns Ihnen zugesandte Formular ein.



Sanitätsfachhandel



Orthopädietechnik



Rehathechnik



Medizintechnik



Kinderreha nach Maß



Home Care